

GK-Basic +



Brugermanual

CE



Tillykke med din beslutning om at købe en GK Badekar. Du har erhvervet et østrigsk kvalitetsprodukt, der vil lette belastningen i patientplejen betydeligt.

På grund af deres avancerede ergonomiske design er GK Badekar enkle og ligetil at bruge. På trods af dette vil vi bede dig om at læse instruktionerne omhyggeligt, før badekarret tages i brug. De detaljerede oplysninger i denne vejledning vil lette det praktiske arbejde.

☰ Indhold

Indhold	...	2
Sikkerhed	...	3
Forberedelse før bad	...	4
Komponenter	...	5-7
Funktioner	...	8-10
Hævning og sænkning af karret	...	8
Indstilling af temperatur	...	8
Brusebad	...	8
Fyldning af kar	...	9
Tømning af kar	...	9
Desinfisering	...	9
Flowmeter	...	9
Hydro massage	...	10
Fyldning — Til	...	10
Fyldning — Fra	...	10
Pleje og rengøring af badekar	...	11
Vedligeholdelse, Service	...	12
Anvendelsesformål, Standard og regler	...	13
Tekniske data	...	14
Identifikations plade og labels	...	15
Transport, Opbevaring, Genbrug	...	15
Noter	...	16-18

■ Sikkerhed

- Vær opmærksom på at dette bade system kun bliver betjent af professionelle.
- Tjek altid vandets temperatur før brugeren stiger i badet eller når brugeren har fået brusehovedet.
- Vær opmærksom på at udstyret er rengjort efter brug.
- Vær opmærksom på at hver bruger er vurderet for sin ambulerede evne, for at sikre brugerens sikkerhed ved indstigning og udstigning. (brug håndtag, korrekt indstigningshøjde, korrekt patient forflytnings udstyr osv.)
- Under desinficering, brug handsker og beskyttelsesbriller. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, følg proceduren på desinfektionsmidlet og materialets sikkerheds papir.
- Vær altid opmærksom på at udstyret er tilsluttet strøm.
- Vær opmærksom på at der ikke er materialer som ligger i vejen for at badet kan køre op og ned. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlige uheld eller skader på udstyret.
- Opbevar ikke genstande på badet. På grund af bevægelser og vibrationer kan tingene falde på gulvet eller ned i badet.
- Vi vil gerne pointere at et liftebadekar er et pleje badekar og brugeren skal støttes af en passende lift.
- I tilfælde af at ingen lifte bliver brugt, anbefaler vi at udstyre badekarret med håndtag.

Note: *Sikkerheds regler og instruktioner i denne brugermanual må læses for at sikre sikker og ordentlig brug af udstyret. Justeringer og reparationer skal foretages af autoriserede og kvalificerede personer. Alle påstande under garantien bliver undgået hvis disse forespørgsler ikke bliver overholdt.*

■ Forberedelse før bad

- Hvis afløbs proppen ikke er i dræn systemet, put den tilbage.
- Læg puden i den rigtige position.
- Hvis du bruger en bære, behøver du ikke puden.
- For at fylde badet, drejes indløbsventilen mod urets retning.
- Vælg en behagelig temperatur.
- Så snart at vandet har opnået det ønskede niveau, hjælpes brugeren ned i badet eller båren bringes i den rigtige position.
- Brug "OP" eller "Ned" knapperne til at bringe badet i en behagelig arbejds-højde.
- Hvis du ønsker at bruge bruseren under badet, flyt da bruseventilen mod urets retning og fjern den hvide bruser fra holderen. For at starte brusebadet tryk på den sorte aftrækker.
- Nu sænker du badekarret og får brugeren ud af vandet.
- Tøm karret.
- Før du påbegynder en ny bade cyklus, bør du rengøre badet og gennemgå desinfektions proceduren.

Komponenter



■ Komponenter

1. Desinfektion
2. Bruser
3. Stopventil fyldning
4. Stopventil bruser
5. Fylding
6. Termostat mixerventil
7. Overløb
8. Hydro dysser
9. Op/Ned-Knap
10. Dræn
11. Justerbare fødder
12. Hydro-knap



- Tilpasninger

- Desinfektion med stopventil




- Hydro-system

■ Funktioner

Hævning og sænkning af karret

Dette kar tillader plejere at bade patienter i et ergonomisk miljø. Justering af karret til en behagelig arbejdshøjde, forbedrer bade processen. "OP" og "NED" knapperne bruges til at hæve og sænke karret. Bevægelserne fortsætter så længe knapperne bliver holdt nede. Når knappen bliver sluppet, stopper bevægelserne. I den højeste og lavest mulige position, stopper karret automatisk.

Indstilling af temperatur

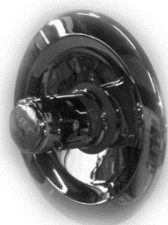


Du kan indstille badets fyldnings temperatur og bruseren til enhver ønsket værdi, ved at dreje knappen på mixer ventilen.

Note:

Af sikkerhedsmæssige grunde er temperaturen mekanisk begrænset til 38°C (standard mixer). For at overskride dette tryk på den røde knap på håndtaget.


Den termostatiske mixer er justeret til 3 bar flow tryk på begge forsyninger. Hvis du har forskellige forsynings tryk, er det muligvis nødvendigt at foretage en ny justering.

Bruser

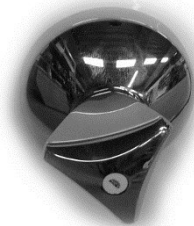


For at bruge bruseren, drej bruser ventilen mod urets retning og tag den hvide bruser ud af holderen. Tryk og hold den sorte aftrækker direkte på den hvide bruser for at begynde brusebadet. Hvis du vil stoppe brusebadet, luk for ventilen og frigør trykket fra slangen ved at trykke på den sorte aftrækker og fjern bruseren.

Fyldning af karret

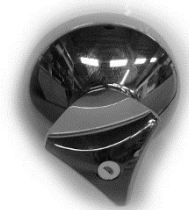


Drej overløbs ventilen mod urets retning for at fylde karret. Når du har nået den ønskede mængde af vand, luk for ventilen for at stoppe påfyldningen.

Tømning af kar

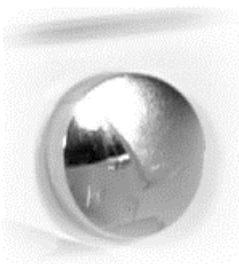

For at åbne drænet, drej det forkromede dræn håndtag i den respektive retning. Vi anbefaler at lukke dræn systemet når indstrømningen er aktiv.

Desinfektion

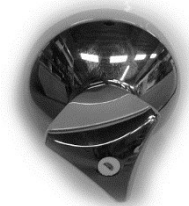


Badekarret bør kun desinficeres når karret er tømt. Drej desinfektions ventilen mod urets retning og flyt den røde bruser fra holderen. Når den er aktiveret, vil en bestemt mængde desinfektionsmiddel rettes mod bruseren for optimal desinfektion og rengøring. Tryk og hold den sorte aftrækker direkte på den røde bruser og spray alle indvendige overflader i karret. Sæt den røde bruser i holderen og luk desinfektions ventilen. Efter den forskrevne kontakt tid brug da den hvide bruser for at rense de indvendige overflader i karret grundigt. For rengøring, bør maximal temperatur vælges.

Flowmeter



Flowmeteret bliver brugt til at justere blandingsforholdet mellem vand og desinfektionsmiddel. Bordet ved siden af den, skal hjælpe dig med at finde den rigtige værdi. Følg altid instrukserne fra væskens forhandler. Flowmeterets indstillinger bør generelt være ordnet når du installerer karret.

Hydro massage

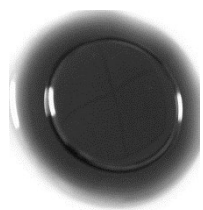


Denne terapi er kun tilgængelig med et fuldstændig fyldt badekar. Så snart badekarret er fyldt, kan du starte terapien ved at trykke på knappen på siden af karret. Ved første tryk på knappen, starter du hydro-dysser. Hvis du ønsker at stoppe terapien, skal du trykke på knappen igen.

Fyldning — Til



For at aktivere fyldning tryk på krom-knappen, som er mærket med "TÆND". Vandet vil nu komme ud af fyldnings tuden. Ved forud indstillet fyldnings-niveau, vil vandudstrømningen stoppe automatisk. Hvis mere vand er nødvendigt, brug da bruseren for at tilføje mere vand.

Fyldning — Fra

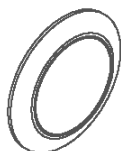

For at deaktivere fyldning, tryk på krom-knappen som er mærket med "SLUK". Vand til førelsen vil stoppe med det samme.

■ Pleje og rengøring af kar

Efter brug, rens badekarret grundigt med bruseren. Enhver form for snavs som klæber til karrets overflader skal fjernes med en blød svamp eller klud— **Brug ikke grydesvampe.**

For at forlænge badekarrets levetid, anbefaler vi at det bliver poleret en gang om måneden. Dette vil give badekarret en glat, vandafvisende overflade og det vil gøre rutine rengøringen nemmere. - Det vil også forbedre udseendet af dit GK badekar


Vi anbefaler at bruge vores godkendte produktsortiment af GK produkter med dit GK Basic+ bad.

Ethvert produkt som er blevet brugt til at rense eller desinficere dit GK Basic+ bad, skal være fri for slibende, alkohol, syre, baser og ætsende ingredienser. Hvis du er i tvivl ang. dine almindelige rengøringsmidler, kontakt da venligst din GK repræsentant **før brug**, fremvis COSHH data blad om nødvendigt.


NB: Enhver skade forårsaget af ikke godkendte/upassende produkter vil ikke blive dækket af forhandlerens garanti.

En desinfektions cyklus bør altid udføres efter rengøring. Når det er passende, bør hydromassage-dyssernes cover, også blive rengjorte og desinficeret.

Det følgende diagram viser hvordan man fjerner og rengør hydromassage dysserne.

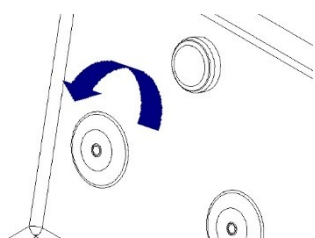

Rotér dyssens cover mod urets retning indtil den let kan blive fjernet

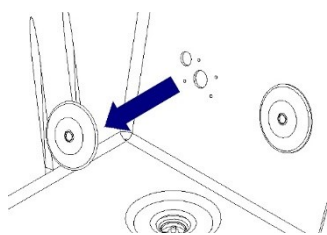

Rengør dyssernes cover, indløbsåbningen og udgangsåbningen grundigt. Erstat dyssens cover ved at rotere med uret.

NB: Brug ikke overdreven kraft!

■ Vedligeholdelse

- Tjek slanger, rør og forbindelser fra tid til anden.
- Vær opmærksom på at beholderen til desinfektionsmidlet er overvåget.
- Vi anbefaler at du udnytter dit vedligeholdelses service og anmoder om et funktionelt tjek hver 12. måned.
- Justeringer og reparationer skal udføres af autoriserede og passende kvalificerede personer.
- Undersøg om der er revner eller andre skader på karret.
- Undersøg brusehovedet og rengør den hvis det er nødvendigt.
- Ved service af badekarret, sørg for at karret ikke er tilsluttet, og slukket.

■ Service

Mindst **en gang om året** er et service eller sikkerheds tjek obligatorisk, ifølge Medical Device Directive (MDD)

- Husk at GK Service er uovertruffen i kvalitet og også i forhold til garanti-problemer. GK vil kun se sig selv som ansvarlig for sikkerheds-relaterede sager hvis, vedligeholdelse, reparationer, modifikationer osv. udelukkende er udført af vores service team eller af personer som er godkendt af os.

Når uheldet sker, vil detaljeret information omkring symptomer, type og serie nr. (se type plade) hjælpe os med at svare hurtigt.

■ **Anvendelsesformål**

Badesystem for badende patienter med begrænset mobilitet. Badesystemet er hovedsageligt brugt på pleje institutioner, og I mindre grad på hospitals afdelinger. Det bliver brugt i et professionelt miljø af trænet og kompetent personale.

■ **Standard og regler**

I henhold til klassifikationsregulering i henhold til Bilag IX i the Medical Device Directive 93/42/EEC, er badekarret en klasse I Medical Device.

Det har været testet for overholdelse af de essentielle krav i henhold til Bilag I i Directive 93/42/EEC, og som bevis for overholdelse af de lovlige krav, er CE mærkning blevet fixet.

■ Teknisk data

Badekar **GK-Basic+**:

- Spænding: 230 VAC / 115 VAC
- Frekvens: 50 Hz / 60 Hz
- Strømförbrug: 320 VA
- Sikring: 6,3 AT
15 AT

- Beskyttelses klasse: I / II 
- Grad af beskyttelse: IPX4
- Beskyttelses type: Type B

- Løfte vægt: 5000 N
- Løfte højde: 250 mm

- Maximum længde: 1950 mm
- Maximum bredde: 830 mm
- Maximum højde: 940-1190 mm

■ Identifikations plade og etiket

Georg Krämer		
Ges.m.b.H. & Co.KG		
Erzeugung medizinischer Geräte		
Neuhauserweg 14, Tel.+43/ 72 29 / 64 4 50		
A-4061 Pasching		
Type	Magic 2000	
Fabr.Nr.	4260	Bj.10/2005
Eigengewicht	200	kg
Tragkraft	400	kg
Netzspg.	230 V	50 Hz
Anschlussleistung	800	VA
Schutzklasse	24	Ip


Identifikations plade

Denne plade giver dig information omkring produktet, f.eks. Type, produktion, dato og serie nr.



ISO 9001

Vores produktion er underlagt et kvalitets ledelses system ifølge ISO 9001

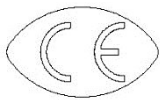

CE Mærkning

Det er blevet testet for overholdelse af de nødvendige krav i henhold til Bilag I i direktivet 93/42/EEC, og som et bevis på overholdelse af de lovlige krav, CE mærkning er blevet anbragt.

■ Transport, opbevaring, genbrug

Betjenings betingelser

Max omgivelses temperatur:	40°C
Max relativ luftfugtighed:	80% ikke kondenseret ved 20°C
Atmosfærisk trykområde:	500 hPa to 1060 hPa

Transport og opbevaring

Omgivelsestemperaturområde:	-20°C til 60°C
Relativ luftfugtighed:	80% ikke kondenseret ved 20°C
Atmosfærisk trykområde:	500 hPa til 1060 hPa

Genbrug

Pakning: Træ og bølgepap, genbrugeligt.

Produkt: Elektrisk, stål og plastik dele skal separeres og genbruges

■ Noter



Georg Krämer Ges.m.b.H. & Co. KG

A-4061 Pasching
Neuhauserweg 14

Tel. +43 / (0) 7229 / 64450
Fax +43 / (0) 7229 / 70664
service@gk-medizinmechanik.at

FAABORG REHAB TECHNIC



Faaborg Rehab Technic ApS

Smedemestervej 9
5600 Faaborg
DK

Tlf. +45 / 70 20 55 53
office@faaborg-rehab.dk
www.faaborg-rehab.dk