



**CARELINE**



## **BRUGERVEJLEDNING CARELINE MOVER**

**Art. No. 2121 – CARELINE MOVER**



Rev. 10.10.2013

## **Forord**

Tak for dit valg af Careline Mover. Alle kendetegn ved dette produkt er et nemt og brugervenligt designet. Hvis du har ideer eller spørgsmål / problemer der ikke løses i brugervejledning så kontakt Faaborg Rehab Technic eller besøg os på internettet: [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)

## **Sikkerhed Instruktion**

Før ibrugtagning af Careline Mover læs da venligst brugervejledning igennem. Den indeholder VIGTIGT anvisninger for korrekt anvendelse og vedligeholdelse af MOVER. Producenten hæfter ikke for skader, der udspringer af forkert brug.

## **Formål**

Robust og rengøringsvenligt MOVER, med stel af stål og aluminium. MOVER aktiverer og støtter samtidig personer med nedsat styrke i ben eller med nedsat balance i at rejse og sætte sig, og til sikker forflytning mellem stol, kørestol, toilet eller seng.

## **CE mærket**

Følgende produkt er CE mærket i overensstemmelse med: Announcement regarding Medical Equipment No. 225 of March the 11th 2011. And The European Communities Council Directive 93/42/EEC of 14th July 1993

## **Garanti og ansvar**

Hvis en fejl eller defekt til stede ved modtagelse af Careline Mover, er det Faaborg Rehab Technic ansvar at reparere eller erstatte enheden. Udskiftning af dele er Faaborg Rehab Technic ejendom. Garanti periode er 2 år og starter ved modtagelse. Din faktura er garantibevis. Skulle din Mover kræve service kontakt da Faaborg Rehab Erstatning vil ikke blive accepteret hvis fejlen er: Ukorrekt eller upassende brug, ukorrekt installation af ejer eller 3 part, ukorrekt brug af kemikalier eller fugtighed i enheden.

## Produkt display

Håndtag

Knæ  
støtte

Sæde  
støtte

Fodplade

Hjul med bremse

Hjul uden bremse



### Teknisk information

Bredde:	575 mm
Længde:	860 mm
Højde:	1060 mm
Vægt Mover:	19,6 kg
Max bruger vægt	150 kg

## Brug af MOVER:

Slå sædestøtterne til side og kør hen til bruger.

Brugeren placerer fødderne på MOVER fodplade og tager fat i håndtag. Brugeren læner sig

let fremover og trækker sig op til stående. Hjælperen slår sædestøtterne ned og

brugeren kan sætte sig eller flytte brugeren til kørestol, toilet og seng

Se billeder under:



## **Advarelse**

Husk at bruge bremse.



## **Rengøring og vedligeholdelse**

Knæ og sæde støtter er lavet af et materiale, der er let at vedligeholde, kunstlæder testet i henhold til DIN 54020

Brug en tør eller fugtig fiberklud til rengøring af MOVER, hvis det er nødvendigt, kan milde rengøringsmidler anvendes, derefter skylles med varmt vand.

Brug ikke opløsningsmidler, alkohol-baserede desinfektionsmidler, grove rensedmidler.

## **Service og teknisk kontrol**

Skal foretages en gang om året.

## **Reparation, service og teknisk support**

Ved problemer eller spørgsmål kontakt:

Faaborg Rehab Technic

Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.

Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: [office@faaborg-rehab.dk](mailto:office@faaborg-rehab.dk)    [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)

**FABORG REHAB TECHNIC**

