



Bade-Toiletstol 2018

Montage - og brugervejledning

(med montering af 24" hjul som ekstra tilbehør)



Faaborg Rehab Technic
Smedemestervej 9
5600 Faaborg
www.faaborg-rehab.dk



1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Faaborg Rehab Technic direkte.

Faaborg Rehab Technic

Smedemestervej 9
DK-5600 Faaborg

Telefon: +45 70 20 55 53

E-mail: office@faaborg-rehab.dk

2. Sikkerhedshenvisninger

Benyt kun produktet i fejlfri tilstand. Hvis der opdages, mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren. Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.

Benyt kun produktet til det oplyste formål. Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse. I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m. er der risiko for at klemme fingrene. Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag

Produktet må ikke anvendes til at stå på.

Alle hjul SKAL hele tiden være i kontakt med underlaget uden brug. Dette sikrer at produktet er i balance hvorved uheld undgås.

Når produktet anvendes i stationære situationer, skal hjulene låses.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Den Bad-toiletstol har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan derudover bruges i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har brug for siddestøtte under bad og toiletbesøg. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes andet værktøj til samling end en unbrakonøgle.

Stolen leveres i en kasse, adskilt, for at spare plads under transport.

Indholdet er:

- 1 ramme med sæde
- 1 ryg
- 2 fodstøtter
- 4 hjul med bremse
- 4 bolte og møtrikker for montering af hjul
- 1 spand med lås
- 1 PU lås for at dække sædets udskæring
- 1 brugervejledning



4. Tekniske data

Bade- toilet stol	2018	Forskel med 24" hjul monteret
Total højde justerbar i 25 mm trin	90 - 95 cm	=
Sæde bredde	45 cm	=
Total bredde	57 cm	+ 8 cm
Max. bredde mellem armlæn	46	=
Sæde dybde	43 cm	=
Sædehøjde justerbar i 25 mm trin	45 - 60 cm	=
Hjul	125 mm	
Ryg højde	47 cm	=
Total vægt	12,90 kg	+ 2,90 kg
Max. belastning	150 kg	=



5. Montagebeskrivelse

Bade- toiletstolen monteres som på billedet ovenfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge:

- Tag alle dele ud af kassen og check at alle dele er der. Hvis der mangler noget, skal der tages kontakt til forhandleren øjeblikkeligt.
- Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet.
- Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rør ende. Der er boret 2 huller (A & B) i såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan monteres i 3 forskellige højder. Sørg for at alle hjul er monteret til samme højde. Fastspænd boltene forsvarligt.
- Nu vendes rammen om. Lås hjulenes bremses før der fortsættes.
- Monter ryggens rør i de 2 montagehuller på bagsiden af rammen. Fastgør ryggen ved at dreje på grebene.
- Monter låget på spanden. Skub det ind i skinnerne monteret under sædet. Gøres fra fronten af stolen. Derefter lukkes udskæringen med PU-låget.
- Monter fodstøtterne ved at sætte plastproppen i toppen af fodstøtterne i rørenderne i rammefronten. Drej derefter fodstøtten til den låser.



6. Flytning af kombistol


Advarsel !



Ved transport skal sædet indstilles på den lavest mulige position med mulighed for fri bevægelighed for transporthjul (fra fodstøtter).

Kombistolen er udstyret med 4 uafhængige hjul med bremse, (figur 4):

- TRANSPORT (A) – stolens 4 hjul er ikke låst
- ARBEJDE (B) – stolens 4 hjul er bremset, når den røde bremse er aktiveret

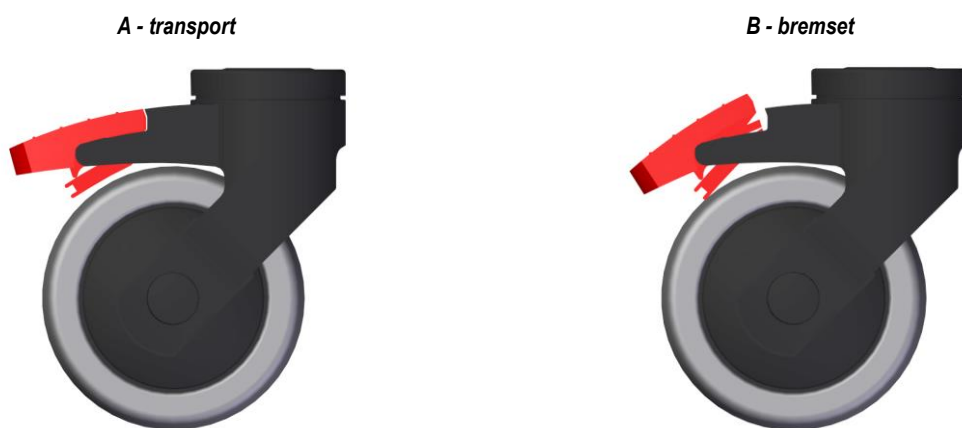

Figur 4.



6.1. Montering og afmontering af fodstøtte

Kombistolen er udstyret med aftagelige fodstøtter. For at fjerne fodstøtte, skal du trykke på udløserknop og trække fodstøtten op (figur 5). Montering gøres modsat.



Figur 5

6.2. Højdejustering af fodstøtte

Højdeindstilling sker ved kantergreb, som er placeret på hoveddelen af fodstøtten (figur 6). For at ændre højden af fodstøtte top, løsnes kantergreb. Indstil den ønskede fodstøtte længde og lås låseskruen.



Figur 6



6.3. Afmontering af sæde

For at rengøre overfladen af sædet og ramme placeret under sædet, fjern sædepladen (figur 7). For at fjerne sædepladen trække op i den forreste del og træk i retning af fodhvilerne. For at montere sædepladen, indsætte det på sæderammen og skubbe den forreste del til at blokere klinkelementerne. Hjælpelinjerne som er placeret under pladen sikre den stabile sæderammen.



Afmontering

Montering
Figur 7

7. Rengøring

Til daglig rengøring anbefaler vi aftørring med overfladedesinfektion (vådservietter), enten med antibakterielle ingredienser (i henhold til SSI's retningslinjer) eller med alkohol.

- For en grundigere rengøring er det muligt at vaske Kombistol i automatiske vaskemaskine eller med mættet vanddamp i op til 1 minut ved 90° Celsius, op til 5 minutter ved 85° Celsius eller op til 10 minutter ved 80° Celsius.
- Rengøring af og under toiletsædet foretages let. For at fjerne sædet, se afsnit 6.8 afmontering af sæde. Herefter kan både stel og sæde rengøres.
- Afhængigt af vandets hårdhedsgrad, hvor du bor, anbefaler vi at du regelmæssig fjerner kalk. Anvend ikke syre eller lignende. Sprøjt stolen med vinsyre (1:1) eller husholdningseddike, lad virke i 2-3 timer og skyl med vand. Aftør stolen med en tør klud. I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt at anvende kalkfjerner. I så tilfælde bør den minimum fortyndes 1-4 med vand, før den påføres de kalkede områder på stolen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

Advarsel!

Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en kalkbinding på hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et kalkopløsende middel og derefter smøres med smøreolie.

Advarsel!

Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme, og garantien vil bortfalde.



7.1. Vedligeholdelse af Kombistol

- Rengør metaldelene med en blød, fugtig klud/svamp. Tør delene efter umiddelbart efter rengøring.
- Alle bevægelige led skal smøres hvert halve år, eller når det ”knirker” eller der forekommer anden støj. Bevægelige dele er navnlig:
 - Aksel ved hjul,
 - Aksel Aktuatorer,
 - Bevægelige dele
- Vi anbefaler at bruge alle tilgængelige smøremidler. Beskyt polstrede dele fra kontakt med smøremidler og fjern eventuelle overskydende mængder eller lækager af disse med en tør klud.
- Tjek gevindsamlinger regelmæssig, eller mindst hvert halve år, Sådanne samlinger er især:
 - Bolte svejsning med øvre og nedre ramme;
 - Hjulskruer,
 - Armlænskruer.
- Er der løse forbindelser, der ikke kan løses tages stolen ud af brug og kontakt forhandler for service.

Generel problemafhjælpning

<i>Hvad er der sket?</i>	<i>Hvad kan være grunden?</i>	<i>Hvad skal jeg gøre?</i>
Badestolen er ikke stabil	Hjulene er justerede til forskellige højder.	Juster alle hjulene til samme højde.
Hjulene drejer ikke let.	Der har samlet sig skidt på hjulenes aksel.	Rengør hjulenes aksler for skidt.

7.2. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. GARANTI

Sammen med din Kombistol får du fabriksgaranti. Denne manual kan kun håndtere fabriksgarantien, der gives af Faaborg Rehab Technic ApS. Din faktura er dit garantibevis, husk at gemme det omhyggeligt. Denne garanti gives kun til dig som køber. Garantien er begrænset til fejl på materialer og eventuelle skjulte mangler.

Betingelser for garanti

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Hvis der inden for garantiperioden, sker din kombistol bliver defekt, vil den blive repareret eller udskiftet.

Reparation og udskiftning skal udføres af Faaborg Rehab Technic ApS serviceværksted. For at få garantien, skal din kombistol være vedligeholdt som beskrevet i vejledning. Hvis der opstår et problem, skal du straks informere Faaborg Rehab Technic ApS.

Hvis dele af kombistolen har behov for udskiftning eller skal erstattes inden 24 måneder efter garantidatoens start, på grund af fabrikationsfejl eller andre væsentlige fejl/mangler, bliver dette repareret eller udskiftet gratis,

Udskiftes eller repareres dele falder de under samme garantibestemmelser som originale stolen. Slidte dele er normalt ikke garanteret, medmindre disse dele er slidte, som et direkte resultat af en original produceret defekt. Disse dele er for eksempel polstring, hjul og lignende reservedele.



9. Årligt serviceeftersyn

Kombi stolen har brug for periodisk vedligeholdelse. Dette er nødvendigt for en lang levetid. En dårligt vedligeholdt kombistol vil give flere tekniske problemer, dreje mindre fleksibelt og miste garantien. Vi anbefaler, derudover du lader din kørestol kontroller 1 gang om året af en autoriseret forhandler.

10. Service checkliste

For optimal levetid af din Kombi stol, skal den regelmæssigt vedligeholdes af en autoriseret forhandler.

K = Kontrol

S = Smøring

U = Udskiftning

Service interval:	Service Skema								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Service nummer									
Hjul									
Bremse									
Fodstøtte:									
Ramme stel									
Armlæn:									
lak / maling / krom									
Sæde:									
Polstring:									
Aktuator højde									
Aktuator tilt									
Batteri									
Alle samlinger									
Smøring af bevægelige dele									
Kontrolleret af (initialer)									
Inspektion dato									

Service stempel

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10