



## Brugervejledning Careline Dobbelt Åg med Vægt

### Formål

Dette produkt er nemt og brugervenligt designet.

Vægten ses her sammen med dobbelt åg

Art Nr. 1140-1150C3



### Sikkerhedsanvisning

**Dobbelt åg med vægt er IKKE beregnet til at foretage forflytninger med.**

Brugervægten må maksimalt være 250 kg. Den maksimale brugerbelastning er begrænset af den laveste vægtgrænse for lift eller sejl.

Undersøg ved enhver tvivl om liftproducenten godkender brugen af denne vægt.

### Rengøring og vedligeholdelse

Husk altid at slukke vægten før rengøring. Vi anbefaler sprit og en ren blød klud til rengøring af vægt.

Vær venlig ikke at bruge store mængder vand, da det kan ødelægge elektronikken. Brug aldrig syre eller base til rengøring.

### Påsætning og brug af Dobbelt åg med vægt

- Kun beregnet til vejning af patienter!
- Indstil bredden til aktuelt løfte åg på den benyttede lift
- Stropperne sættes i krogen, **brug altid 4 stropper**, 2 i hver side.
- Sejlet som skal benyttes hægtes i krogen og hæves fri af underlaget.
- På vægtenheden findes en nulstillings knap denne aktiveres og efter ca. 10 sekunder vises der "0,0" i displayet, vægten beholder sit nulpunkt også når vægten slukker.
- Placerer sejlet som ved normal brug og placere sejlet i løftekrogen og løft brugeren op til der ikke er kontakt med underlaget (løft ikke højere end nødvendig).
- Vægten kan nu aflæses i displayet.
- Afmonter løfte åg fra lift efter endt vejning.

Faaborg Rehab Technic  
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.  
Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: [office@faaborg-rehab.dk](mailto:office@faaborg-rehab.dk) el. [fr@faaborg-rehab.dk](mailto:fr@faaborg-rehab.dk)

Web: [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)